



ResMed

Gecko nosní podložka Výběr správné velikosti

1. Vytiskněte tuto stránku.
2. Vystříhnete znázorněné podložky podle přerušovaných čar.
3. Podložka velikosti L je považována za standardní velikost a je ideální pro masky velikosti M a L.
Podložka velikosti S je ideální pro masky velikosti S a XS.
4. Vystřížené podložky umístíte na obličej, abyste mohli určit potřebnou velikost.
Pokud si nejste jistí, doporučujeme vybrat větší velikost.



Křidélka podložky by měla dosahovat na úroveň mezi zornicemi a vnějšími koutky očí.
Podložka může být umístěna v různých úhlech, aby se přizpůsobila konturám vašeho obličeje.

**Správný výběr velikosti masky a správné nasazení masky
přispívají k většímu pohodlí masky.**



Maximální šířka: 10,5 cm

Maximální výška: 4,8 mm



Maximální šířka: 8,3 mm

Maximální výška: 3,8 mm